

10年以上にわたり  
世界60ヶ国で使用されている **DENTKIST**  
信頼のシーリング材 **日本初上陸**。日・米・韓で特許取得済

フッ素徐放性光重合型シーラント®

**2-1set**  
チャームシール 2-1セット

# CharmSeal®

**低収縮性と高い圧縮強度**  
**高密着性により脱落しにくい!**  
更に

**高い耐摩耗性により長期に渡る**  
**カリエス予防効果があります。**

**極細チップでつかいやすい**  
**シリシタイプ。**

チャームシールは  
長期的なフッ素  
徐放性を有します



1セット 医院価格 ¥2,200

商品名: チャームシール (2-1Set)  
内容量: チャームシール :2g×2本 (ジェットノードルカーブタイプ)φ0.7mm×10本 チャームエッチ :5ml×1本 (ジェットノードルカーブタイプ)φ0.5mm×5本

一般的名称: 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材・歯科用エッチング材  
認証番号: 224AKBZX00024000・224AKBZX00051000



シーラント前。 歯面清掃。溝の中に付着した汚れを除去します。 必要に応じてラバーダム等の防湿を行いエッチング処理を行います。 水洗い後、乾燥させます。 直接又はマイクロアプリケーション・ブラシ等で溝の底が完全に埋まるよう溝に沿って過不足なく塗布してください。 光重合器で約10~20秒\*照射し、必要に応じ咬合調節を行います。 \*重合器により異なります。 チャームシールによるシーラント後。

フッ素徐放性光重合型シーラント®

## CharmSeal® 4 Refill

チャームシール リフィル

詰替え用はコチラ

●MMA-MF 共重合体  
フッ素徐放性ポリマーを配合しています。  
●流動性、又し性がよく小窩裂溝深くまで浸入し、  
密着・封鎖します。

1本(2g)あたり **900円**

商品名: チャームシール (リフィル) 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 認証番号: 224AKBZX00024000  
内容量: 2g×4本/ティスポーザブルチップ (ジェットノードルカーブタイプ)φ0.7mm×20本 医院価格: ¥3,600

高粘度の37%リン酸エッチング剤

## CharmEtch®-37HV

チャームエッチ

1本(5ml)あたり **400円**

粘度が高いので窩洞辺縁のエナメル質マージンに限定したセレクトティブエッチングにも最適。

使用前 使用後

エナメル質: 20~30秒  
象牙質: 10~15秒の処理で清掃効果の他、  
又し性の向上・被着面積増加により優れた  
接着強度が得られます。

チャームエッチ 37HVによるデンチン 15秒塗布。  
水洗後のSEM像 (歯面拡大写真)

商品名: チャームエッチ 歯科用エッチング材 認証番号: 224AKBZX00051000  
内容量: 5ml×3本/ティスポーザブルチップ (ジェットノードルカーブタイプ)φ0.5mm×15本 医院価格: ¥1,200

## CharmSeal・CharmEtch その他の薬液塗布などに便利なアプリケーション

マイクロアプリケーション **PICO**ピコ

適度なコシと直毛密度が高く毛先が広がらないブラシ **イージーブラシ**

Point 1 B.S.A.のアプリケーションのココが便利  
先端部分もお好きなところで折り曲げOK。

Point 2 毛先に触れずに、1本ずつ取り出せて、とっても衛生的!!

1本あたり **5円**~

歯科用として使用されるあらゆるボンディング剤、エッチング剤、レジン液剤はもとよりアセトン100%、ジクロロメタン100%といった溶剤においても**脱毛はありません。**

サイズ	S	M	L
スティックカラー	ホワイト	ブルー/イエロー パープル/グリーン	オレンジ
先端寸法	φ1.0mm	φ1.5mm	φ2.0mm

サイズ	S	M
スティックカラー	ホワイト	ブルー/ピンク
先端寸法	φ1.0mm	φ1.5mm

1筒100本入り 医院価格 ¥700  
S 400本 L 400本  
M 4色アソート400本 ¥2,000

1筒100本入り 医院価格 ¥700  
パリュエバック 同色4筒入 ¥2,000

**ピコ・イージーブラシお試し半額セール!!**

どちらもどのサイズも1筒100本入り **700円**のところ  
1筒 **350円**でお試し頂けます。 -期間H24/10/31まで-

BSA 株式会社ビーエスエーサクライ <http://www.bsa-sakurai.co.jp>